


MONTERING

Monteringsinstruktion för Kontrastmarkering toalettsits

Du behöver: Medföljande appliceringsskrapa, sax, linjal samt tejp.

1

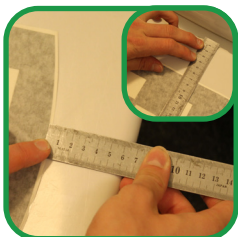

Gör rent toalettlocket med rengöringsmedel för toalett. Placera ut kontrastmarkeringen och mät ut så att kontrastmarkeringen hamnar i mitten av toalettlocket.

2




När ni är nöjda med placeringen, fäst kontrastmarkeringen med en remsa tejp i mitten. Lyft upp ena sidan av kontrastmarkeringen och separera den från bakpappret den sitter på. Använd saxen och klipp av pappret. Håll kontrastmarkeringen spänd och använd skrapan. Dra flera drag med skrapan för att minska risken för bubblor.

3



Ta bort tejprensan och upprepa proceduren ovan på den andra sidan av kontrastmarkeringen.

4

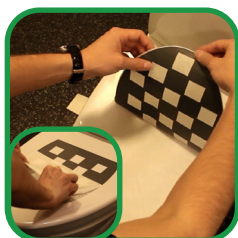

När den väl sitter på plats på toalettsitsen så kan ni dra bort monteringsstejpen som sitter ovanpå toalettkontrasten.
Färdigt!

Tips och råd

- Se till att alltid ha en ren bakgrund för att undvika dålig applicering. Dra med jämna drag med appliceringsskrapan för att undvika bubblor.
- Värt att tänka på är att effekten av ditt arbete är att personer med synnedsättning inte lägger telefoner och handbagage i toaletten.
- Se vår [instruktionsfilm](#) på: <https://www.youtube.com/watch?v=5JA3Jv-6lbc>

Eller skanna koden:



- Lycka till!

Vid andra frågor eller funderingar. Kontakta oss via mail: info@jcgt.se eller ring till: 031-24 11 09

För mer information. Gå in på vår hemsida www.jcgt.se